

tenés anticuerpos?

>>> En Laboratorios Bacon tenemos un test rápido de MP Biomedicals para el diagnóstico de Covid-19 IgG / IgM combo mediante una prueba inmunocromatográfica.

- >>> Este kit de origen alemán, de fácil uso y permite al profesional con sólo tres pasos obtener resul-tados en 10 minutos.
- Procedimiento sencillo, no requiere equipamiento. Elevada especificidad, sensibilidad y precisión. - Detecta diferentes estadíos de la enfermedad.

De fácil uso, en solo 3 pasos:



Agregar 2µL de muestra de sangre en área "S1" según se observa en la figura.



Adicionar 2 gotas de buffer a la celda denominada "S".



Leer el resultado a los 10 minutos. No leer pasados los 15 minutos. En la zona de lectura se visualizaran las siglas C (control), G (IgG) y M (IgM)









ම fincarossa

onocé nuestra Casa